

# Safe Ear Curettes™

Bionix® Safe Ear Curettes permitem aos prestadores de saúde remover com segurança e delicadamente o cerume, com estilos para corresponder a diferentes tipos de cera e preferência pessoal.



## PROBLEMA

As curetas de aço inoxidável rígidas não só causam dores e desconforto do paciente, como também podem ferir facilmente o canal auditivo e a membrana do tímpano.

## SOLUÇÃO

As Bionix Safe Ear Curettes são flexíveis, de modo a reduzir os ferimentos no canal auditivo, tornando-as mais seguras do que as curetas de aço inoxidável.

## RESULTADOS

Sete estilos de pontas codificadas por cores para cumprir necessidades específicas, “fornecendo-lhe a ferramenta certa para qualquer tarefa” para cada situação de cerume.

*“Utilizo curetas auditivas Bionix desde a minha residência médica.  
Para mim, são o padrão de ouro.” - Sidney Shah, MD*

## POTENCIAL REEMBOLSO (APENAS NOS EUA)

Código CPT/Descrição

**69210** - Para o potencial reembolso de cerume impactado.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelas, BÉLGICA  
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-mail: mail@obelis.net  
BionixLLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, EUA  
Tel: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS PROBLEMAS QUOTIDIANOS

+1 800.551.7096 • [www.bionix.com](http://www.bionix.com)


©2021 Bionix LLC | INTL-0045-PT | Rev. C

# Safe Ear Curettes™

## OFERTA DE PRODUTOS

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADULTO |    | <b>CeraSpoon® amarela   #6333</b><br>A CeraSpoon amarela é perfeita para cera mais mole, especialmente em pacientes que produzem quantidades excessivas de cerume. <b>4 mm</b>           |
|        |    | <b>ControLoop® laranja   #2999</b><br>A ControLoop laranja tem uma ponta estilo "Shapleigh" dobrada que permite que a cera seja extraída diretamente do canal auditivo. <b>4 mm</b>      |
|        |    | <b>AngleLoop® vermelha   #3444</b><br>A AngleLoop vermelha tem uma ponta angulada que facilita aceder a cerume rígido de difícil acesso comum em pacientes mais velhos. <b>4 mm</b>      |
| GERAL  |    | <b>FlexLoop® branca   #9555</b><br>A FlexLoop branca é uma cureta multifunções concebida para a curetagem normal numa série de pacientes. <b>4mm</b>                                     |
|        |  | <b>VersaLoop® roxa   #4111</b><br>A VersaLoop roxa tem uma ponta macia flexível que permite ao utilizador um controlo excecional enquanto oferece mais conforto ao paciente. <b>3 mm</b> |
|        |  | <b>InfantScoop® azul   #4888</b><br>A InfantScoop azul destina-se a ouvidos mais pequenos e pode ser utilizada através de um otoscópio. <b>2 mm</b>                                      |
|        |  | <b>MicroLoop® verde   #1222</b><br>A MicroLoop verde tem uma construção mais rígida e destina-se a remover o cerume impactado duro. <b>3 mm</b>                                          |

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

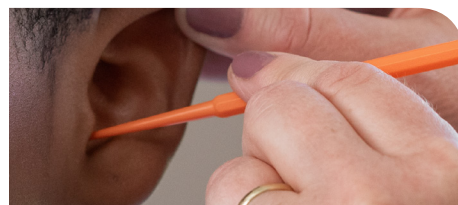

### CURETAGEM NORMAL

1. Utilize um otoscópio para determinar a localização do cerume.
2. Selecione a cureta apropriada para o tipo de paciente e cerume.
3. Coloque a cureta no canal auditivo e remova o cerume.
4. Repita o exame com o otoscópio e determine a localização de qualquer cerume restante.



### CURETAGEM COM OTOSCÓPIO

1. Utilize um otoscópio para determinar a localização do cerume.
2. Selecione uma das Safe Ear Curettes™ para jovens.
3. Deslize a ampliação de endoscópio para um lado.
4. Coloque a cureta através do otoscópio e remova o cerume.

*"A variedade de tamanhos e formas das pontas torna a remoção de cera do ouvido mais fácil do que nunca."* - Carl A. Moritz, Jr., MD



BIONIX®, CeraSpoon®, FlexLoop®, InfantScoop®, MicroLoop®, AngleLoop®, VersaLoop® e ControLoop® são marcas comerciais registadas. Safe Ear Curettes é uma marca comercial da BIONIX.

SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS PROBLEMAS QUOTIDIANOS

+1 800.551.7096 • [www.bionix.com](http://www.bionix.com)